


Die Genio Routine

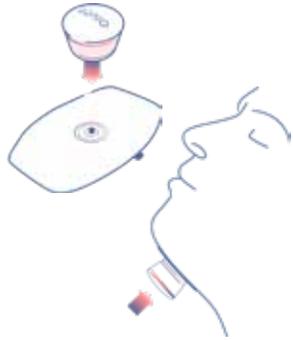


Bevor Sie zu Bett gehen

Verbinden Sie den Aktivierungs-Chip mit einem neuen Einwegpflaster und kleben Sie es unter Ihr Kinn.



Während Sie schlafen

Die Stimulation beginnt, wenn Sie einschlafen, und hält Ihre Atemwege die ganze Nacht über offen. Ihre Atemfrequenz wird als Referenz verwendet, um den Stimulationszyklus anzupassen, damit Sie einen guten Schlaf genießen können.

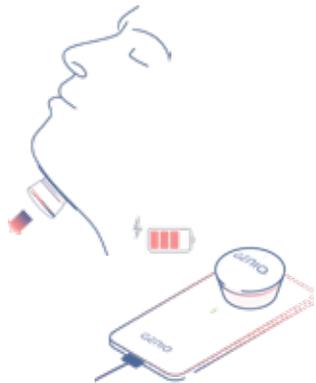

Nach dem Aufwachen

- Lösen Sie das Pflaster von Ihrem Kinn.
- Entsorgen Sie das Pflaster.
- Laden Sie den Aktivierungs-Chip einfach in der Ladestation auf.

Sind Sie bereit, einen erholsamen Schlaf zu genießen und das Leben wieder in vollen Zügen zu genießen?

Erfahren Sie mehr auf GenioSleep.de oder rufen Sie die Helpline an, um mit einem medizinischen Berater über Genio zu sprechen.

Kontaktieren Sie uns von Montag bis Freitag zwischen 9:00 und 18:00 Uhr.


 Deutschland

 0800-4848048

 Österreich /  Schweiz

 00800-3333 2225

Gebührenfreie Nummern

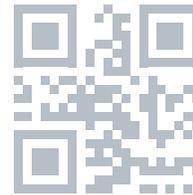

GENIO.

Indikationen für die Anwendung: Genio® ist für die Behandlung erwachsener Patienten bestimmt, die an mittelschwerer bis schwerer obstruktiver Schlafapnoe (OSA) leiden und eine Therapie mit positivem Atemwegsdruck (PAP) nicht vertragen haben oder ablehnen, oder bei denen diese Therapie nicht wirksam war.

Alle Rechte vorbehalten © 2023 Nyxoah S.A. Der gesamte Inhalt dieser Broschüre, einschließlich der Texte, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Logos, Illustrationen, Fotos, Grafiken, des Designs usw., ist Eigentum von Nyxoah S.A. Nyxoah S.A. besitzt alle Rechte in Bezug auf ihre Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Logos und Urheberrechte, die in dieser Broschüre erscheinen. Patentierte und designgeschützte Technologie. Dok. ID: MS-GEN-002078-GE Rev04

CE-gekennzeichnet seit 2019.

Achtung – Prüfprodukt in den Vereinigten Staaten.
Durch US-amerikanisches Bundesrecht auf Untersuchungszwecke beschränkt.

GenioSleep.de

Bereit für eine CPAP-Alternative?



Mit Genio kann der Schlaf wieder einfach sein

GENIO.
by Nyxoah.

Behandlung obstruktiver Schlaf- apnoe mit Genio

Haben Sie in der Nacht Probleme mit Ihrer CPAP-Maske und fühlen sich nach dem Aufwachen immer noch müde?

Wir möchten Ihnen Genio vorstellen

- ✓ Genio ist bequem und elegant - Sie brauchen keine Maske zu tragen
- ✓ Genio arbeitet leise (keine Geräusche und keine Maschinen) und diskret
- ✓ Genio ist minimalinvasiv - die Operation erfordert nur einen einzigen diskreten Schnitt
- ✓ Genio ist mit Ganzkörper-MRTs kompatibel
- ✓ Mit der intuitiven Genio-App können Sie Ihre Behandlung individuell gestalten und verfolgen



Das Genio-System

Das Genio-System besteht aus einem implantierbaren Neurostimulator, einem Aktivierungs-Chip und einem Klebepflaster.

Implantierbarer Stimulator

Ein kleiner Neurostimulator wird unter dem Kinn in der Nähe des Zungenmuskelnerfs implantiert



Aktivierungs-Chip und Einwegpflaster

Der Aktivierungs-Chip wird mit einem Einwegpflaster verbunden, das Sie vor dem Schlafengehen unter Ihr Kinn kleben. Der Chip enthält die Batterie und das individuelle Stimulationsprogramm.



Sie sind für Genio geeignet, wenn:

- ✓ Sie an mittelschwerer bis schwerer OSA mit einem AHI zwischen 15 und 65 leiden
- ✓ Sie eine CPAP-Therapie nicht vertragen haben oder ablehnen, oder diese Therapie nicht wirksam war
- ✓ Sie nicht deutlich übergewichtig sind (BMI unter 35 kg/m²)
- ✓ Sie erwachsen sind



Schließen Sie sich Tausenden von Patienten auf der ganzen Welt an, die bereits erholsame Nächte durch Neurostimulation genießen.