

## Bestimmung von Immunsuppressiva mittels LC-MS/MS

### Blutentnahme und Versand

1



Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferte Monovette des Typs Sarstedt EDTA-Monovette® 2,7 mL, da sonst keine Bearbeitung der Probe möglich ist.

Befüllen Sie die Monovette vollständig und brechen Sie anschließend den Stempel ab.

**Hinweis:** Entnahme-Sets (Butterly & Adapter) können Sie bei uns kostenfrei anfordern.

2



Beschriften Sie die Monovette gut leserlich und in eindeutiger Weise mit den Patientendaten.

3



Stecken Sie die Monovette in das mitgelieferte Schutzgefäß und verschrauben Sie den Deckel fest.

4



Füllen Sie den Anforderungsschein gut leserlich aus. Fügen Sie bei Kassenpatienten einen Laborüberweisungsschein bei.

Legen Sie Monovette und Anforderungsschein in die mitgelieferte Versandbox, verschließen diese und senden sie an uns ein.

### Rückfragen

Bei Rückfragen zum Probenversand oder bei Befundnachfragen wenden Sie sich bitte an Telefon 0511 532 4070.

Informationen zur Bestimmung der Immunsuppressiva erhalten Sie auch unter [www.mh-hannover.de/diagnostik-tdm.html](http://www.mh-hannover.de/diagnostik-tdm.html)